

Reis cpap apparatuur

Jan Harks
Produkt Manager



SOLGROUP
a breath of life

Programma

1. Reis cpap versus standaard cpap
2. Reis cpap van Transcend
3. Reis cpap van Breas, Z1
4. Reis cpap van Resmed, AirMini
5. Reis cpap van Philips, DreamstationGo



Reis cpap vs standaard cpap

- Zelf aanschaffen
- Opmerkingen geluid
- mn passieve bevochtiging
- Minder dan 850 gr
- Minder stroomverbruik
- Soms speciale accu

Vergoed door ZV
Zelden opmerkingen geluid
Verwarmde bevochtiging
Meer dan 2 kg



Reis cpap van Transcend

- 3 type apparaten, autopap – cpap EZEX – cpap
- Eerste fabrikant met een reiscpap
- Ontworpen om op het hoofd te dragen
- Oorspronkelijk met connectie kit om maskerinzet in te zetten
- Instellen en therapie effectiviteit aflezen via PC software



Transcend accessoires

- 2 maten accu's
- Flexibele zonnecollector voor opladen accu
- Verwarmde bevochtiger
- DC stroomadapter
- Basestation
- Slang adapter
- Reusable filter incl bodemplaat



Breas Z1

- 2 type apparaten, apap en cpap
- Display
- In te stellen via display
- Therapie effectiviteit aflezen op display of met App Nitelog



Breas accessoires

- Z1 Qtube
- Passieve bevochtiger (dagelijks vervangen)
- Powershell incl accu
(gebruiksduur 8 uur op druk 14 mbar)
- Filter (na maand vervangen)



Resmed AirMini

- cpap en apap modes
- uitsluitend te gebruiken icm speciaal slangenset
- 3 type slangensets, 1 voor F20, 1 voor N20 en 1 voor P10
- Instellen en aflezen met app Airmini



Resmed AirMini accessoires

- Mask pack P10 (incl aangepast P10masker)
- 2 Setup pack's tbv F20 of N20 (exclusief masker)
- AirMini mountsysteem
- Humid X of Humid X Plus
- Airmini Hardcase
- AirMini Reistas
- Filter (vervangen na 6 maanden)



Philips DreamstationGo

- Cpap en apap modes
- Zelfde blower als Dreamstation
- Kleuren display, bediening gelijk Dreamstation
- Instellen via display
- Therapie effectiviteit aflezen met app Dreammapper



Philips DreamstationGo accessoires

- accu (gebruiksduur 13 uur bij druk 10 mbar)
- 12 mm slang
- Kleine reiskit
- Grote reiskit
- Herbruikbaar pollenfilter
- Disposable fijnfilter (na 1 maand vervangen)



Overzicht

	Transcend autocpap	Transcend EZEX	Transcend cpap	Breas Z1 autocpap	Breas z1 cpap	Resmed AirMini	DreamstationGo
Modes	apap of cpap	cpap	cpap	apap of cpap	cpap	cpap of apap	cpap of apap
Afmeting (cm)	15,5 x 8,9 x 7,1	15,5 x 8,9 x 7,1	15,5 x 8,9 x 7,1	16,5 x 8,4 x 5,1	16,5 x 8,4 x 5,1	13,7 x 8,4 x 5,3	15 x 15 x 5,8
gewicht	425 gram	425 gram	425 gram	284 gr	284 gr	300 gr	845 gr
Drukverlaging bij uitademing	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Passieve bevochtiging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verwarmde bevochtiging	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	komt op de markt
Slangtype	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	15 mm	12 mm
accu	P4 - 8 uur, P8 - 16 uur	P4 - 8 uur, P8 - 16 uur	P4 - 8 uur, P8 - 16 uur	8 uur	8 uur	geen	13 uur
Scherm	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja, kleur
Software	PC software	PC software	PC software	app Nitelog	Pc software	app Airmini	app Dreammapper
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar

Overzicht

	Transcend autocpap	Transcend EZEX	Transcend cpap	Breas Z1 autocpap	Breas z1 cpap	Resmed AirMini	DreamstationGo
Voltage in	110V- -220V	110V- -220V	110V- -220V	110V- -220V	110V- -220V	110V- -220V	110V- -220V
verbruik	30 Watt	30 Watt	30 Watt	20 Watt standaard Max 35 Watt	20 Watt standaard Max 35 Watt	20 Watt	22 Watt standaard Max 35 Watt

Voordat u met het vliegtuig op reis gaat

- Vraag een (douane) verklaring bij uw leverancier
- Informeer uw luchtvaartmaatschappij dat u medische apparatuur mee neemt als handbagage
- Stel u de vraag;

wat doe ik als de cpap stuk gaat ?

